

产品成份: 蛋白酶、糖酶、淀粉酶、脂肪酶等。

产品功能: 可以有有效的清除人体的血液、黏液等有机污染物。可有效预防生物膜形成。同时增加针对清除脂肪的碱性清洗剂配方，组合成效果完整的“鲁沃夫”传统型多酶清洗剂，含有RINSE成份，清洗后有效排除化学成份无残留。

产品特点: ●高性价比，经济实惠，节省成本。自然降解无残留，无热源，可直接排放。
●碱性配方具有隔离、乳化等作用，可确保清洗更彻底更快速。

适用范围: 适用于手工清洗和机械清洗。

使用方法: 1. 稀释比率: 1: 270 (每2000mL水加入7.5mL的本产品)

2. 水的温度: 小于60℃。

3. 操作建议:

【手工清洗】浸泡在稀释后的清洗剂中至少2分钟后刷洗。带关节的器械尽量打开。已凝固或污染特别严重处可用刷子在水面下刷洗(请注意刷洗勿离开水面以避免污染水飞溅)。

【机械清洗】直接放入机器的清洗剂置入槽中并调整稀释比例即可。

※建议使用“保湿剂”系列产品，可避免污染物的凝固等问题。

注意事项: 清洗剂请勿直接接触皮肤，如不慎碰触请用清水冲洗即可。不可食用，摆放远离儿童。

储存要求: 阴凉干燥处存放，避免高温和冷冻，每次使用后请旋紧瓶盖。

温馨提示: 操作人员需戴手套及护目镜防止清洗时污染物的交叉感染。

有效期: 三年 **规格:** 4升

中国总经销: 杭州鲁沃夫货物进出口有限公司
杭州市滨江区高新技术开发区南环路3391号

联系电话: 0571-8669-6600

传真: 0571-8669-6999

网 址: www.ruhofchina.com

企业进口代码: 3300668048530

生产商: THE RUHOF CORPORATION
393 Sagamore Avenue, Mineola, New York 11501
1-800-537-8463 • (516) 294-5888 • Fax (516) 248-6456
Website: www.ruhof.com • E-mail: Ruhof@ruhof.com

※温馨提示:本产品是美国原装进口,请将使用后的空桶交由当地经销商集中销毁处理。
本产品适用于各种材质,遵照说明正确使用,不会对手术器械或清洗机造成任何损伤或损坏。