

产品成份：主要为表面活性剂等。

产品功能：加速复用器械及器皿表面干燥并防止水中矿物质沉淀造成水垢。

产品特点：● 具有排水性，可加速器械和玻璃器皿表面干燥并防止水中矿物质沉淀造成水垢。

● 具有强化的表面活性剂，有效帮助水与污染物的结合，方便残留物的排除。

适用范围：适用于手工清洗及机械清洗。

使用方法：● 稀释比例1：300（每1000mL水加入3.5mL本品）。

● 全自动清洗消毒机清洗的最后一道程序冲洗时使用。

注意事项：漂洁上光剂请勿直接接触皮肤，如不慎碰触请用清水冲洗即可。不可食用，摆放远离儿童。

储存要求：阴凉干燥处存放，避免高温和冷冻，每次使用后请旋紧瓶盖。

温馨提示：操作人员需要佩戴手套及护目镜防止清洗时与污染物的交叉感染。每次使用后请旋紧瓶盖。

有效期：三年 **规格：**4升

中国总经销：杭州鲁沃夫货物进出口有限公司
杭州市滨江区高新技术开发区南环路3391号

联系电话：0571-8669-6600

传真：0571-8669-6999

网 址：www.ruhofchina.com

企业进口代码：3300668048530

生 产 商： THE RUHOF CORPORATION
393 Sagamore Avenue, Mineola, New York 11501
1-800-537-8463•(516) 294-5888•Fax (516) 248-6456
Website: www.ruhof.com•E-mail: Ruhof@ruhof.com

※温馨提示:本产品是美国原装进口,请将使用后的空桶交由当地经销商集中销毁处理。

本产品适用于各种材质,遵照说明正确使用,不会对手术器械或清洗机造成任何损伤或损坏。